



## BRUGSANVISNING tv-adapter

## INTRODUKTION


Denne tv-adapter sender trådløst tv-lyden til dine høreapparater via Streameren.

Du får lyden fra fjernsynet sendt direkte til dine høreapparater, inden for en afstand på op til 10 meter fra fjernsynet.


Inden du går igang bedes du kontrollere, at tv-adapteren er tilsluttet korrekt til både fjernsynet og strømforsyningen. Læs mere om dette i installationsguiden.

Denne brugsanvisning forklarer, hvordan Streameren benyttes for at høre lyden fra fjernsynet.

## STREAMER

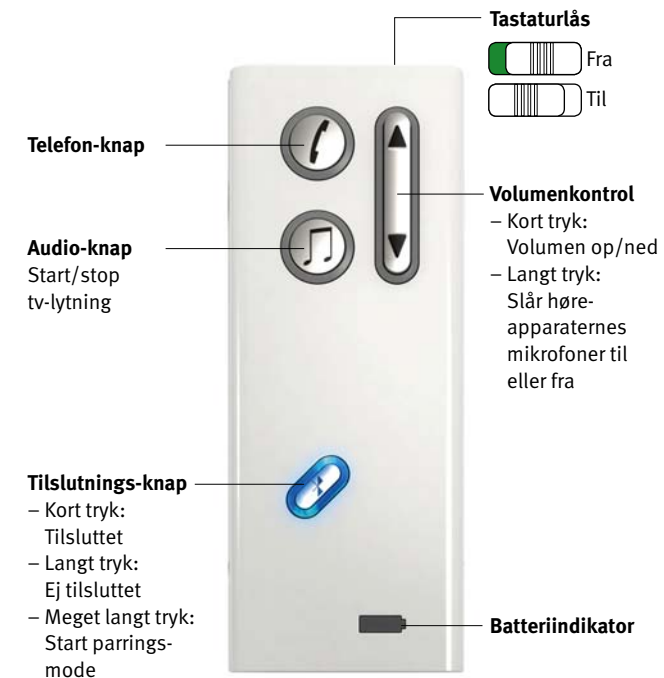

*Når den er fuldt opladet, kan Streameren bruges til tv-lytning i ca. 5 timer.*

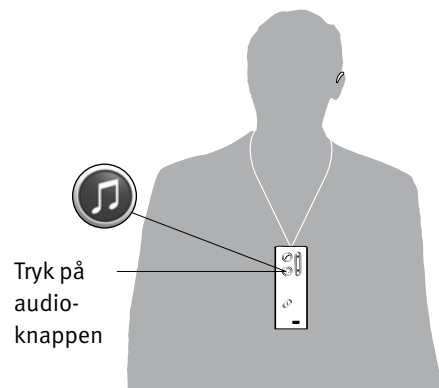**Før lytning**

Bær Streameren om halsen (benyt nakkestroppen). Du skal befinde dig inden for **10 meter** fra fjernsynet.

Brug Streamerens audio-knap til tv-lytning.

**START lyd**

Tryk kort på audio-knappen. Streameren tilslutter til tv-adapteren. Efter få sekunder lyser knapperne på henholdsvis Streameren og tv-adapteren konstant orange. Høreapparaterne modtager nu lyd fra fjernsynet.



STATUS

**STOP lyd**

Tryk kort på audio-knappen. De orange knapper slukkes. Høreapparaterne går tilbage til standardprogrammet (P1).

*Bemærk: Tilslutningsfunktionen på Streameren skal være tændt for at kunne modtage lyden fra fjernsynet. Hvis den ikke er tændt, vil den automatisk slås til, når man begynder tv-lytningen. Tilslutningsfunktionen kan slås fra manuelt.*

Brug Volumen-knappen på Streameren til at justere fjernsynets lydstyrke i høreapparaterne.



Justér lydstyrken ved at kort trykke op eller ned. Gentag med **korte tryk** for yderligere justeringer.



Den indstillede fjernsynsvolumen, som indstilles via Streameren bliver husket. Den seneste indstilling vil også blive benyttet, næste gang tv-lytningen påbegyndes.

*Bemærk: Fjernsynsvolumen i høreapparaterne påvirkes som regel ikke af at man skruer op eller ned for lyden ved hjælp af fjernsynets fjernbetjening.*

**KUN LYD FJERNSYNSLYD**

Første gang du lytter til fjernsynet, vil mikrofonerne i høreapparaterne som standard være tændt.

Høreapparaternes mikrofoner kan slås fra, så du kun hører lyden fra fjernsynet.

Dette gør du ved at trykke op eller ned på volumenkontrollen i 2 sekunder.



2 sek.

Ved at trykke på volumenkontrollen i 2 sekunder igen, slår du høreapparaternes mikrofoner til igen.

*Bemærk: Mikrofonernes indstilling bliver husket. Den seneste mikrofonindstilling vil også være gældende næste gang du påbegynder fjernsynslytning.*

For detaljeret information om Streameren henviser vi til Streamerens brugsanvisning.

Du kan finde fler tips og læse mere på:  
[www.oticon.dk/connectline](http://www.oticon.dk/connectline)