

Fejlfinding



Problem	Løsning
LED blinker rødt	Batteriniveauet er lavt. Oplad Vibio ved hjælp af det medfølgende kabel.
LED lyser ikke	Batterierne er flade. Oplad Vibio i ca. 1,5 time.

Vibio kan ikke oprette forbindelse til min mobiltelefon

Begynd med at kontrollere Bluetooth-forbindelsen på appens startskærm. Hvis ikonet Vibio er rødt og overkrydset, prøv følgende:

- 1 Bevæg dig rundt i lokalet.** Placer din mobiltelefon tættere på Vibio.
- 2 Slå Bluetooth til og fra.**Swipe for at åbne kontrolpanelet/panelet for hurtige indstillinger på mobiltelefonen, og tryk på Bluetooth-ikonet.

Hvis det stadig ikke fungerer, skal du nulstille og genoprette forbindelsen manuelt mellem Vibio-Pudevibratoren og appen. Prøv følgende:

- 1 Afinstaller appen helt.** Bemærk, at det er ikke nok blot at lukke den.
- 2 Afbryd forbindelsen til Vibio.** Gå til Indstillinger > Bluetooth. Tryk på  /  og Glem denne enhed for at afbryde forbindelsen til "Vibio". Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret.
- 3 Nulstil Vibio.** Træk og hold i stroppen, indtil LED begynder at blinke. Slip og træk igen, indtil LED begynder at vise blåt.
- 4 Indstilling Vibio.** Start appen Vibio igen, og følg instruktionerne.

Tilsigtet brug

Personlig vibrerende alarmerhed, som kan anvendes til vækning sammen med en mobilapp.

Strøm og batteri

Batteristør: 1 × 3,7 V AA Lithium-ion
Strømforbrug: Aktiv med stærk vibration: < 1000 mA, Inaktiv: < 100 µA
Driftstid: Op til 10 dage/opladning
Opladningstid: Op til 1,5 time @ 500 mA
Opladningsstrøm: Op til 500 mA, 5 V jævnstrøm

Kompatibilitet

iOS11 / Android 4.4 og nyere,
iPhone 5s og nyere/
Moderne Android-enheder

Størrelse og vægt

Størrelse: 27 × 94 × 94 mm,
Vægt: 153 g, 5,4 oz

Frekvens og dækning

Bluetooth-frekvens: 2402-2480 MHz
Udgangsstrøm: Maks. 2,5 mW (4 dBm)
Dækning: Op til 30 m, 33 yd, frit område.
Forbindelse: Bluetooth 4.2

Kabler og tilslutninger

Kabellængde: 1 m, 39"
Kontakter/stik: USB-type A til USB Micro-B

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelsesfri. Rengøres med en tør klud. Undgå at benytte rengøringsmidler, aerosolspray, alkohol eller slibemidler.

Lovkrav

Overholder CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE,
Der Grüne Punkt

Miljøkrav

Kun til indendørs brug
Temperatur: 0 – 35 °C, 32 – 95 °F
Relativ luftfugtighed: 15-90 %

Sikkerhed og garantibetingelser

Se særskilt bochure

Bellman & Symfon Group AB
Södra Långebergsgatan 30, 436 32 Askim,
Sverige. Telefon +46 31 68 28 20
Email info@bellman.com
© og TM 2020, Bellman & Symfon AB,
alle rettigheder forbeholdes.

BE1221_019AWAND03




DANSK

Hvad du har brug for

- En mobiltelefon med iOS11/Android 4.4 eller nyere.
- En USB-strømadapter

Hvad er der i æsken


- 1 Ladekabel
- 2 Vibio-Pudevibratoren

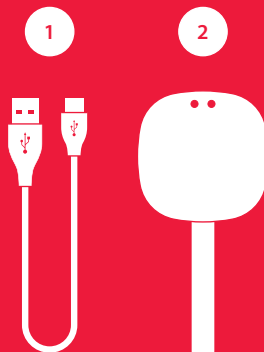

Vibio-Pudevibratoren, BE1221

Se efter de blinkende øjne

- **Hvid betyder**, at den er aktiveret af en alarm eller kommunikerer med din mobiltelefon.
- **Blå betyder**, at den er klar til parring.
- **Grøn betyder**, at den oplader.
- **Gul betyder**, at du har et indgående opkald eller har modtaget en besked.
- **Rød betyder**, at batteriniveauet er lavt.

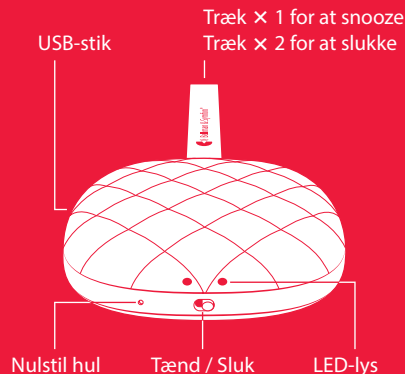

Nulstil hul Tænd / Sluk LED-lys


Installere Vibio

1 Opstart

Tilslut opladningskablet til din Vibio , og tilslut stikket i en USB-strømadapter eller et USB-stik på computer.

2 Tænd før Vibio

Skub Tænd/Sluk-knappen til højre, og placer Vibio tæt på din mobiltelefon.

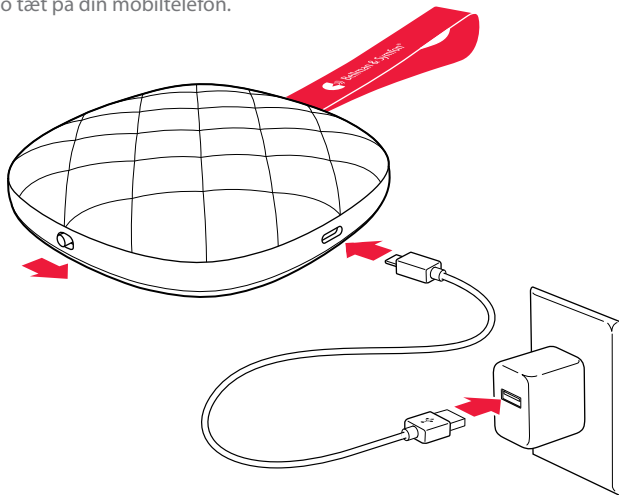

3 Installere appen



Hent **Vibio** app fra App Store® eller Google Play™, og følg instruktionerne for opsætning.



Brug af appen

Håndtering af alarmer



Tilføj. Tryk på Plus-knappen for at tilføje en ny alarm.



Rediger. Tryk på Blyant-knappen for at redigere en alarm.



Slet. Tryk på Minus-knappen for at slette en alarm.



Tænd / Sluk. Tryk på Tænd/Sluk-knappen for at aktivere eller deaktivere alarmerne.

Overvågning af Vibio



Tilslutning. Ikonet Vibio viser status for forbindelsen.



Batteri. Batteriikonet viser det aktuelle batteriniveau.

Yderligere information



Hjælp. Tryk på Menu > Hjælp for at lære mere om appen.

